

Pro medix

Asphalin B Tabletten

REF 554.1 | Instrumentendesinfektion | 10 Tabs | Packung[zum Produkt](#)

Asphalin B Tabletten

REF 554.1 | Instrumentendesinfektion
10 Tabs | Packung

Beschreibung

Zur Erzeugung einer keimtötenden Lageratmosphäre für verpackte, sterile zahnärztliche und chirurgische Instrumente.

Asphalin B Tabletten erzeugen in geschlossenen Behältnissen durch Kontakt mit der Luftfeuchte eine keimtötende Formaldehyd-Atmosphäre. Dieser Vorgang erfolgt nach 6 Stunden ohne organische Belastung. Hierdurch werden verpackte, sterile Instrumente wirksam vor einer erneuten, vorzeitigen Kontamination geschützt.

Classification

Medizinprodukt, Klasse IIb, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

1/4



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40



Pro medix**Asphalin B Tabletten****REF** 554.1 | Instrumentendesinfektion | 10 Tabs | Packung[zum Produkt](#)**Anwendung**

Verpackte, sterile Instrumente werden in eine geeignete, dicht schließende Schale oder Behältnis gegeben, in der die Tablette bereits seit mindestens 6 Stunden Ihre Wirkung entfaltet. Hierfür empfehlen wir Becht Asphalin Schalen REF 700 und 633. Das Behältnis bei 18 - 50 °C dicht verschlossen lagern und nur zur Entnahme öffnen. Erhöhte Luftfeuchte (> 50 %) verstärkt die Wirkung. Tablette nach 14 Tagen ersetzen.

Zusammensetzung

Paraformaldehyd, Camphora racemica, Thymol, Povidon, Talcum, Mangesiumstearat, Silica colloidalis anhydrica, Titanii dioxidum

Zur Beachtung

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Bei der Verwendung von Asphalin B Tabletten empfiehlt es sich, geeignete Schutzkleidung/ Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz zu tragen und das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Gebrauch dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen. Bei Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI Berührung MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort einen Arzt rufen. BEI Berührung MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung, -ausschlag oder anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Die Chargennummer (LOT) sollte bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des Produktes verlangt, angegeben werden. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Gebrauch nur durch Fachpersonal. Nicht geeignet für unsterile Instrumente. Nicht verwenden bei bekannter Überempfindlichkeit oder allergischen Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe.

Gefahrenhinweise

- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen
- Kann Krebs erzeugen
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Classification

Medizinprodukt, Klasse IIb, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

2/4



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40



Pro medix

Asphalin B Tabletten

REF 554.1 | Instrumentendesinfektion | 10 Tabs | Packung[zum Produkt](#)**Classification**

Medizinprodukt, Klasse IIb, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

3/4



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40



Pro medix

Asphalin B Tabletten

REF 554.1 | Instrumentendesinfektion | 10 Tabs | Packung

[zum Produkt](#)

Classification

Medizinprodukt, Klasse IIb, Regel 15 | CE Certificate: CE0197

4/4



Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
77656 Offenburg, Germany

www.alfredbecht.de
Tel.: +49 781 605 86-0
Fax.: +49 781 605 86-40

